



## Bowie & Dick – Tipo Folhas

100 und Ref: 947; 50 und Ref 946

O Bowie & Dick é uma folha teste de indicador impressa com tinta reativa na diagonal em um padrão de gravação cruzada e foi projetada para ser usada em um pacote de teste padrão AAMI Bowie & Dick. Este teste é usado para monitoramento diário em esterilizadores a vapor de alta temperatura/pré-vácuo. A folha de teste verifica a penetração de vapor e a ausência de bolsas de ar residuais antes de iniciar as operações de esterilização do dia.

### Características do produto

Folha indicador para uso em embalagem de teste padrão ou pacote de toalha para realização diária teste Bowie & Dick. Para utilização em esterilizadores pré-vácuo a 134 ° C 3,5 minutos. Alteração de Azul para Marrom/Preto uniforme após o processamento.

### Conformidade:

Norma ISO 11140-5.

### Instruções de uso

- 1- Prepare toalhas 100% de algodão recém lavadas (não passadas), dobradas em tamanho não menor que 23 centímetros por 30 centímetros. Coloque as toalhas uma sobre a outra, suficientes para atingir uma altura de 25 a 28 centímetros.
- 2- Coloque uma folha de teste do Bowie & Dick geometricamente no centro do pacote de toalhas.
- 3- Coloque o pacote de teste preparado em um único invólucro e prenda com fita adesiva.
- 4- Coloque o pacote de teste em um esterilizador aquecido, horizontalmente (plano) em uma câmara vazia, sobre o dreno mais próximo da porta.
- 5- Proceda como de costume, de acordo com as instruções do fabricante do esterilizador. Teste típico é um ciclo de 134 ° C por 3,5 minutos de tempo de exposição. Se a exposição de meio minuto não puder ser selecionada no esterilizador, pode ser usado um tempo de processo de 4 minutos. Não exceda 4 minutos ou o teste será considerado inválido.
- 6- Ao recuperar a folha de teste do indicador, insira a data, o número do esterilizador e as iniciais do operador. Arquive de acordo com o procedimento de retenção de registros.

### Orientações da AAMI:

“O Bowie & Dick teste folha comercialmente disponível, cumprindo a norma ANSI/AAMI ST66, deverá ser colocado no centro do pacote. Um único invólucro de tecido de duas camadas de 100% algodão com uma contagem de fios, em ambos, invólucro e trama, de 5.5 mm deverá ser aplicado com folga para embalar o pacote teste. O pacote deverá ser fechado com fita adesiva.”




clean-up  
BIOTECNOLOGIA

## Avaliação do Bowie & Dick

**Teste:** Teste Bowie & Dick não processado

**Aprovado / Resultado Satisfatório:** A folha de teste do indicador deve mostrar uma mudança uniforme de cor quando exposta aos parâmetros predeterminados de esterilização. Essa cor indica penetração de vapor, remoção de ar adequada e falta de vazamento de ar suficiente.

**Resultado de falha / insatisfatório:** Uma área de cor clara no meio da folha de teste marrom / preta indica que há uma bolsa de ar presente e falta de remoção de ar suficiente. Qualquer resultado que não seja aprovado, deve ser relatado a um responsável qualificado para análise e determinação final.

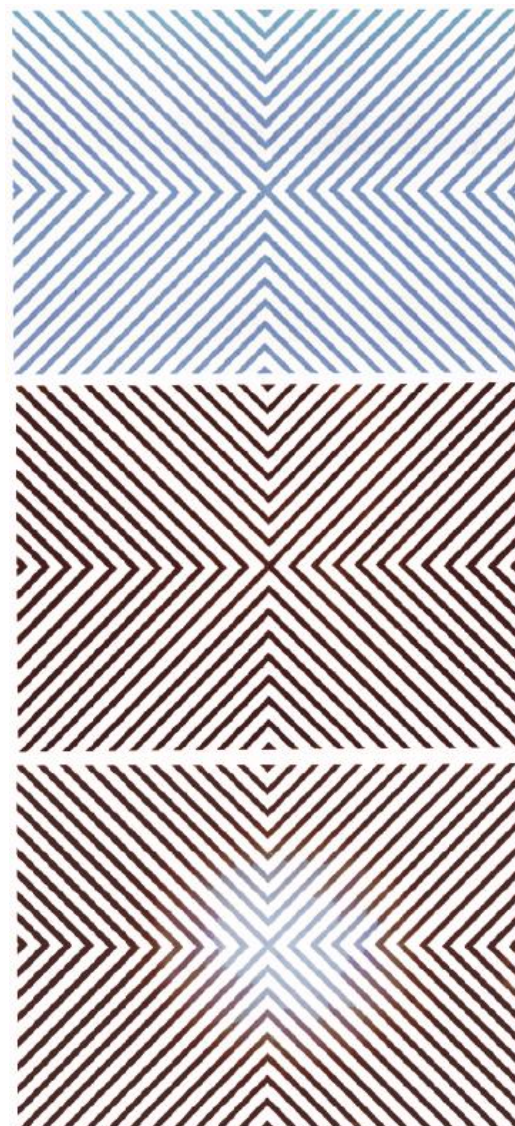

**Armazenamento:** a seco à temperatura ambiente (10-38° C)

**Prazo de validade:** 3 anos a partir da data de fabricação

**Quantidade:** 50 e 100 Folhas.

**Dimensões:** (215,9 mm x 279,4 mm)

**Livre de chumbo.**

**Responsável Técnico:** Daniel Davi Gruchinski. CRQ IX 09203188

**Registro no MS. Produto não considerado “Produto para Saúde” conforme RDC 185/2001 - ANVISA**