



Descritivo Técnico

SoinVie Biossegurança

→ Produto

Integrador Químico

Clean Test - Tiras

Referência: S0933, S0935 e S0936 >

Tipo: 5 >

Excelente estabilidade >



→ Sobre o Produto

01
Integrador conforme
ISSO 11140: 2014 >

02
Monitoramento de processos
de esterilização a vapor >

03
Leitura fácil e imediata >

04
Ótimo custo benefício. >

→ Informações para Pedidos

ITEM #

EMBALAGEM

CÓDIGO DE BARRAS

S0933

Pacote com 25 unidades



S0935

Pacote com 100 unidades



S0936

Pacote com 250 unidades



→ Descrição do Produto

Integrador Químico para Monitoramento de Processos de Esterilização a Vapor. Proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados. Excelente estabilidade indicadora antes e depois da exposição. **Monitoramento de tempo, temperatura e qualidade de vapor** em relação a curva de morte do indicador biológico. Os parâmetros críticos de esterilização são:

Temperatura	Tempo	Condição
121 °C	≥ 16,5 min	Vapor Saturado
128 °C	N/A	Vapor Saturado
135 °C	≥ 1,2 min	Vapor Saturado

Esta condição é calibrada com o tempo de morte de esporos *Geobacillus stearothermophilus*, calculado em um BIER Vessel (*Biological Indicator Evaluation Resistometer*), conforme estipulado em ISO 11140 para um Indicador químico Tipo 5.

→ Instrução de uso

- 01. Destaque uma unidade** de integrador da cartela sem remove-lo do *liner* (papel base do autoadesivo). Coloque o Integrador na embalagem a esterilizar.
- 02. Execute** o ciclo de esterilização.
- 03. Avalie a mudança de cor**, a área que inicialmente é rosa, agora deve ser igual ou mais escura que a cor de referência presente no produto.
- 04. Caso não ocorra a mudança de cor** conforme o gabarito, investigue o processo de esterilização e os demais indicadores químicos, bem como o teste biológico. Todo o material deve ser reesterilizado com uma nova tira integradora.
- 05. Documente os resultados removendo** o liner do integrador e adesive no local de registro. O local de registro deve ser um ambiente protegido de luz e de alta umidade.

→ Características Físicas

Produto é Lead Free-
Livre de Chumbo

Produto fabricado por:
Soinvie do Brasil Ltda.

Medidas: 75mm x 19mm


Validade: 24 meses após a
data de fabricação

Identificação: Lote e data de validade
estão impressos em cada tira

→ Relação de cores


Cor inicial - Não Processado

Produto apresentando um padrão de cor inicial rosa

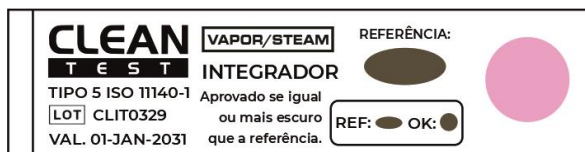

Cor final - Processado e Aprovado

Coloração igual ou mais escura que a cor de referência, parâmetros críticos do processo alcançados

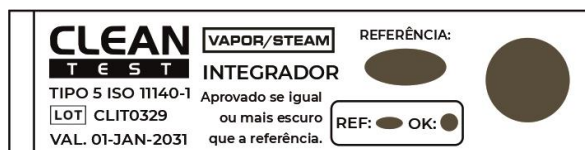

Obs: As cores mostradas são representações das cores iniciais e de sinal da tinta impressa, mas podem variar em relação ao uso real. Cor irreversível quando armazenado em conformidade com os critérios de armazenagem para o produto.

→ Armazenamento



Temperatura:
10 °C a 32 °C.



Umidade relativa:
20% a 80%



Mantenha em local seco,
sem condensação



Mantenha protegido de agentes
esterilizantes, luzes solares, radiação, etc

Isento de registro conforme Instrução Normativa nº2 de 31/05/2011



sacsoinviedobrasil@gmail.com



soinviedobrasil.com.br



+55 44 3531-1552